

RIDX™ CCV Ag Test Kiti

Canine coronavirus (CCV), köpeklerin, özellikle de yavru köpeklerin bağırsaklarında görülen oldukça bulaşıcı bir virüstür. CCV genellikle kısa ömürlüdür, ancak enfekte köpeklerde birkaç gün boyunca önemli abdominal rahatsızlığa neden olabilir.

RIDX™ CCV Ag Test Kiti, numuneyi damlattıktan sonraki 10 dakika içerisinde köpek dışısındaki CCV antijenini hızlı ve kolay bir şekilde tespit edebilen bir teşhis reaktifidir.

Prensip: Kalitatif tespit için immunokromatografik test (Yanal Akış Testi)

Numune: Köpek dışkısı

İçerik (10 test/kit)

CCV Ag test cihazı (10 test)

Numune seyreltici tampon (10 tüp)

Tek kullanımlık sürüntü çubuğu (10 adet)

Tek kullanımlık damlalık (10 adet)

Özellikler

Klinik Sensitivite %94.9 (56/59) vs. RT-PCR


Klinik Spesifite %97.5 (118/121) vs. RT-PCR

Tespit Limiti 1×10^5 TCID₅₀/ml



Test Prosedürü

- 1 Anüsteki ya da dışkıdaki numuneyi toplamak için bir sürüntü çubuğu kullanın.
- 2 Sürüntü çubuğunu numune seyreltici tampona yerleştirin ve numuneyi sürüntü çubuğuyla birlikte karıştırın.
- 3 Sürüntü çubuğunu numune seyreltici tampondan çıkarın.

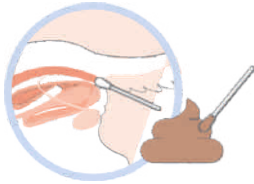

- 4 Büyük partiküller çökene kadar tüpü bekletin.



- 5 Bir damlalık kullanarak supernatantı alın. Cihazdaki numune bölmesine, numune solüsyonundan 4 damla ekleyin.



- 6 Sonuçları 10. dakikada okuyun.

