

RIDX™

CCV/CPV Ag Combo Test Kiti

Canine coronavirus (CCV) ve Canine parvovirus (CPV), köpeklerde ishalin iki ana sebebidir.

RIDX™ CCV/CPV Ag Combo Test Kiti, numuneyi damlattıktan sonraki 10 dakika içerisinde köpek dışısındaki CCV ve CPV antijenlerini hızlı ve kolay bir şekilde tespit edebilen bir teşhis reaktifidir.

Prencip: Kalitatif tespit için immunokromatografik test (Yanal Akış Testi)

Numune: Köpek dışısı

İçerik (10 test/kit)

- CCV/CPV Ag Combo test cihazı (10 test)
- Numune seyreltici tampon (10 tüp)
- Tek kullanımlık sürüntü çubuğu (10 adet)
- Tek kullanımlık damlalık (10 adet)

Özellikler


Klinik Sensitivite CCV %94.9 (56/59) vs. RT-PCR, CPV %98.1 (101/103) vs. PCR

Klinik Spesifite CCV %97.5 (118/121) vs. RT-PCR, CPV %100 (214/214) vs. PCR

Tespit Limiti CCV 1×10^5 TCID₅₀/ml, CPV 5×10^3 TCID₅₀/ml

Test Prosedürü

- 1 Anüsteki ya da dışkıdaki numuneyi toplamak için bir sürüntü çubuğu kullanın.
- 2 Sürüntü çubuğunu numune seyreltici tampona yerleştirin ve numuneyi sürüntü çubuğuyla birlikte karıştırın.
- 3 Sürüntü çubuğunu numune seyreltici tampondan çıkarın.

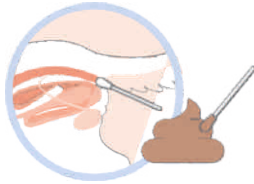

- 4 Büyük partiküller çökene kadar tüpü bekletin.



- 5 Bir damlalık kullanarak supernatantı alın. Cihazdaki her bir numune bölmesine, numune solüsyonundan 4 damla ekleyin.



- 6 Sonuçları 10. dakikada okuyun.

