

RIDX™

FeLV Ag/FIV Ab Combo Test Kiti

Feline leukemia virus (FeLV) ve Feline immunodeficiency virus (FIV) enfeksiyonları, kedilerde hastalık ve ölümün iki temel nedenidir.

RIDX™ FeLV Ag/FIV Ab Combo Test Kiti sadece bir kan numunesi ile iki hastalığı tarayabilir. Bu teşhis reaktifi, numuneleri damlattıktan sonraki 10 dakika içerisinde FeLV antijenini ve FIV antikorunu hızlı ve kolay bir şekilde tespit edebilir.

Prensip: Kalitatif tespit için immunokromatografik test (Yanal Akış Testi)

Numune: Kedi kanı (Tam kan, serum, plazma)

İçerik (10 test/kit)

FeLV Ag/FIV Ab Combo test cihazı (10 test)

Seyreltici tampon (1 tüp)

Tek kullanımlık kapiler tüp (10 adet)

Anti-koagülan tüp (EDTA' lı, 10 adet)

Özellikler

Klinik Sensitivite FeLV %100 (44/44) vs. PCR, FIV %96.8 (30/31) vs. ELISA

Klinik Spesifite FeLV %100 (75/75) vs. PCR, FIV %98.8 (253/256) vs. ELISA

FeLV; FPV, FIV, FHW, FCov' a karşı / FIV; FCov, FeLV, *Toxoplasma*'ya karşı çapraz-reaktivite göstermez.




Test Prosedürü

- 1 Tam kan numunesini alın ve anti-koagülan tüpe koyun. (yaklaşık 1 ml).




(Tam kan kullanılıyorsa)

- 2 Tüpün kapağını kapatın ve numunenin EDTA ile karışması için 5 kez ters çevirin.

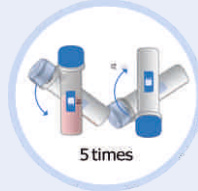


5 times

- 3 Bir kapiler tüp kullanarak, kapiler tüpteki mavi çizgiye kadar, 10ul numuneyi (tam kan, serum ya da plazma) alın.

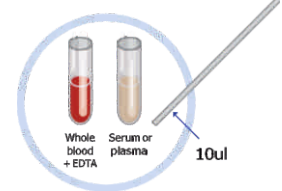

10ul

- 4 Cihazdaki her bir numune bölmesine, 10ul numune ekleyin.

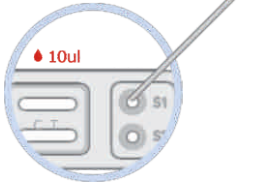

10ul

- 5 Cihazdaki her bir numune bölmesine 2 damla seyreltici tampon ekleyin.



2 drops

- 6 Sonuçları 10. dakikada okuyun.

