

# RIDX™

## Leishmania Ab Test Kiti

Leishmaniasis, enfekte tatarcıkların ısırmasıyla yayılan *Leishmania* parazitleri ile enfeksiyonun neden olduğu bir zoonozdur.

RIDX™ Leishmania Ab Test Kiti, numuneyi damlattıktan sonraki 10 dakika içerisinde köpek serum, plazma veya tam kanında *Leishmania* antikorunu hızlı ve kolay bir şekilde tespit edebilen bir teşhis reaktifidir.

Prinsip: Kalitatif tespit için immunokromatografik test (Yanal Akış Testi)  
Numune: Köpek kanı (Tam kan, serum, plazma)

### İçerik (10 test/kit)

Leishmania Ab test cihazı (10 test)  
Seyreltici tampon (1 tüp)  
Tek kullanımlık kapiler tüp (10 adet)  
Anti-koagulan tüp (EDTA' lı, 10 adet)

### Özellikler

Klinik Sensitivite %97.6 (120/123) vs. IFA  
Klinik Spesifite %100 (305/305) vs. IFA

Köpeklerdeki beş patojenle çapraz-reaktivite göstermez. (Distempervirus, Herpesvirus, *Ehrlichia*, *Babesia*, *Toxoplasma*)

### Test Prosedürü

1 Tam kan numunesini alın ve anti-koagulan tüpe koyun. (yaklaşık 1 ml).




(Tam kan kullanılıyorsa)

2 Tüpün kapağını kapatın ve numunenin EDTA ile karışması için 5 kez ters çevirin.




5 times

3 Bir kapiler tüp kullanarak, kapiler tüpteki mavi çizgiye kadar, 10ul numuneyi (tam kan, serum ya da plazma) alın.

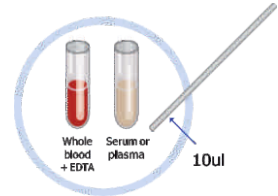

10ul

4 Cihazdaki numune bölgesine 10ul numune ekleyin.

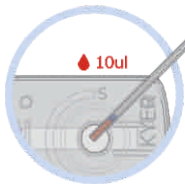

10ul

5 Cihazdaki numune bölgesine 4 damla numune seyreltici tampon ekleyin.



4 drops

6 Sonuçları 10. dakikada okuyun.

