

RIDX™

Toxoplasma Ab Test Kiti

Sıcak kanlı hayvanları enfekte eden protozoon bir parazit olan *Toxoplasma gondii*, Toksoplazmoza neden olur. Kedigiller parazitin tek kesin konakçılarıdır. Enfekte kediler hastalığı insanlara ve diğer hayvanlara bulaştırabilir.

RIDX™ Toxoplasma Ab Test Kiti, numuneyi damlattıktan sonraki 10 dakika içerisinde kedi serum, plazma veya tam kanında *Toxoplasma* antikorunu hızlı ve kolay bir şekilde tespit edebilen bir teşhis reaktifidir.

Prensip: Kalitatif tespit için immunokromatografik test (Yanal Akış Testi)

Numune: Kedi kanı (tam kan, serum, plazma)

İçerik (10 test/kit)

Toxoplasma Ab test cihazı (10 test)

Seyreltici tampon (1 tüp)

Tek kullanımlık kapiler tüp (10 adet)

Anti-koagulan tüp (EDTA'lı, 10 adet)



Özellikler

Klinik Sensitivite %95.5 (21/22) vs. IFA

Klinik Spesifite %95.2 (139/146) vs. IFA

Kedilerdeki beş patojenle çapraz-reakтивite göstermez (FeLV, FCV, FHV, FPLV, *Dirofilaria immitis*)

Test Prosedürü

1 Tam kan numunesini alın ve anti-koagulan tüpe koynun. (yaklaşık 1 ml).




(Tam kan kullanılıyorsa)


2 Tüpün kapağını kapatın ve numunenin EDTA ile karışması için 5 kez ters çevirin.



3 Bir kapiler tüp kullanarak, kapiler tüpteki mavi gizgiye kadar, 10ul numuneyi (tam kan, serum ya da plazma) alın

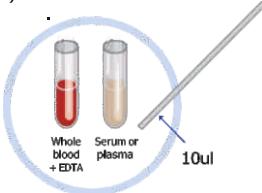

4 Cihazdaki numune bölmescine 10ul numune ekleyin.

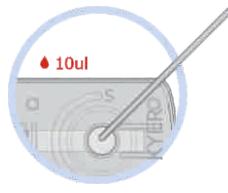

5 Cihazdaki numune bölmescine 4 damla seyreltici tampon ekleyin



6 Sonuçları 10. dakikada okuyun.

